



# Magnum

Andador de exterior

**MANUAL DE USUARIO**

más de 50 años viviendo sin límites

**! Nota importante**

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DESDE TOTALCARE EUROPE

# LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo andador para exterior **Magnum**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

<b>1 – Partes del andador .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – Descripción del producto .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – Características del producto .....</b>	<b>5</b>
<b>4 – Uso y montaje.....</b>	<b>7</b>
<b>5 – Seguridad y más información.....</b>	<b>8</b>
<b>6 – Mantenimiento y limpieza .....</b>	<b>9</b>
<b>7 – Garantía.....</b>	<b>10</b>

## 1. PARTES DEL ANDADOR



## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ANDADOR PLEGABLE PARA EXTERIOR CON CESTA DE GRAN CAPACIDAD

El andador con asiento Magnum, está fabricado en aluminio, material ligero que permite un uso continuado por parte del usuario.

Está diseñado con un sistema de fácil plegado que permite ahorrar espacio en interiores y transportarlo cómodamente. Tiene un cómodo asiento de 41 cm de anchoy 25 cm de profundidad.

Lleva incorporada una bolsa de transporte con cierre de velcro, muy práctica para su uso diario, y también permite llevarla sobre el hombro, gracias a su correa ajustable.

### 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



MAGNUM

#### INFORMACIÓN GENERAL

##### Medidas

Ancho total	56 cm
Ancho entre ruedas traseras	50 cm
Profundidad total	65,5 cm
Alto total (regulable)	80 - 96,5 cm

##### Medidas plegado

Ancho plegado	24 cm
Alto total plegado	80 cm
Profundidad plegado	65,5 cm

##### Peso

Peso total	7,90 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material	Aluminio	Color	Gris claro/Gris oscuro
----------	----------	-------	------------------------

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Asiento

Ancho del asiento	41 cm
Profundidad del asiento	25 cm
Alto del asiento al suelo	53 cm
Material del asiento	Tela ignífuga con respaldo
Color del asiento	Negro

## Ruedas


Medidas ruedas delanteras	Ø19,5 cm
Medidas ruedas traseras	Ø19,5 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm
Ancho ruedas traseras	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas
Tipo de freno	Freno maneta
Número de ruedas delanteras	2 giratorias

## Bolsa


Ancho de la bolsa	31 cm
Alto de la bolsa	32 cm
Profundidad de la bolsa	10 cm
Material de la bolsa	Nailon
Reflectores de la bolsa	Sí
Tipo de cierre de la bolsa	Velcro
Color de la bolsa	Negro / Gris claro

## Otras características

Respaldo	Sí, de nailon
Tipo de plegado	Cruceta
Portabastón	Sí
Reflectores	Sí

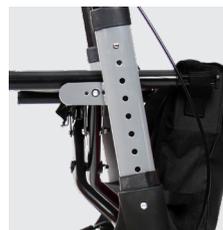

Empuñaduras regulables en altura.

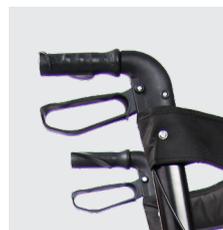

Freno maneta.



Cesta de gran capacidad.

## 4. USO Y MONTAJE

### 4.1. SAQUE EL ANDADOR DE LA CAJA

Antes de empezar, en la caja verá una bolsa con cuatro tornillos de perilla.



### 4.2. USO DEL DESPLEGADO

**Paso 1:** Baje ambas ruedas delanteras y fíjelas firmemente con dos tornillos de perilla uno en cada extremo de la parte superior de la rueda.



**Paso 2:** Ahora debe de realizar la misma acción anterior pero con las ruedas traseras.



**Paso 3:** Despliegue el asiento.



**Paso 4:** Coloque el mango de altura ajustable donde mejor le vaya, para cambiar la altura, presione en el pasador de bloqueo plateado, sabrá que la altura ha quedado completamente fija cuando vea el pasador entre uno de los ocho agujeros.



**Paso 5:** Coloque la bolsa en la percha del andador y use el velcro para fijarlo en el marco.



### 4.3. USO DEL PLEGADO

Para realizar el plegado, puede ayudarse del apartado "4.2. Uso del desplegado", siguiendo las instrucciones a la inversa.

**Paso 1:** Retire la bolsa de la compra del marco.

**Paso 2:** Extraer la empuñadura regulable.

**Paso 3:** Tire de la banda de bloqueo en el medio del asiento hacia arriba: el andador se pliega.

**Paso 4:** Afloje los tornillos del pomo de las ruedas delanteras y luego pliegue las ruedas hacia arriba.

**Paso 5:** Utilice los tornillos de la perilla para bloquear las ruedas.



#### 4.4. USO DEL FRENO

Freno de servicio (al empujar): Tire de las palancas de freno hacia arriba.

Freno de estacionamiento (al estacionar y usar la función de asiento): Presione las palancas de freno hacia abajo.



#### 4.5. MONTAJE DEL PORTA BASTÓN

Con la ayuda de un tornavis, coloque el tornillo en el agujero visible, tal cual como puede apreciar en estas dos imágenes.



## 5. SEGURIDAD Y MÁS INFORMACIÓN

### PRECAUCIÓN

No usar el andador como silla de ruedas o silla de transporte.

- Solo usar el asiento para estar sentado y quieto.
- Nunca sentarse y empujar con los pies.
- No utilizar para subir o bajar escales, escaleras mecánicas o cintas transportadoras.

Consulte siempre con su médico o terapeuta para determinar el uso y ajuste adecuado de la regulación de la altura para obtener el máximo apoyo y la correcta activación del freno.

Asegúrese que ambos pomos de ajuste de altura estén bien apretados y que los puños están a la misma altura. Pruebe la estabilidad antes de usarlo.

Asegúrese que el andador está completamente abierto, el asiento en posición y las bisagras desplegadas correctamente.

Comprobar que los ajustes de altura sean los correctos y que las ruedas se mueven libremente antes de utilizarlo.

Respete el límite de peso del producto.

Reemplace las ruedas cuando estén desgastadas o dañadas. Comprobar las ruedas delanteras semanalmente para detectar signos de daños.

Suspenda el uso del andador si comprueba que las ruedas están flojas y vuelva al lugar donde las compro para ajustarlo.

No exponer a temperaturas extremas ( muy altas o muy bajas ), humedad o que se moje, para evitar deformaciones de las piezas de plástico.

Todas las ruedas tienen que estar en contacto con el suelo a la hora de utilizar el andador para que esté equilibrado.

#### Para evitar que vuelque:

- No intente alcanzar objetos si tiene que moverse hacia adelante mientras esté sentado en el andador.
- No cuelgue nada en el andador.
- El respaldo debe estar siempre en su sitio y no está diseñado para soportar todo el peso corporal.
- Si quiere alcanzar o recoger algún objeto debe colocar ambos pies firmemente en el suelo.
- No añadir más peso al andador cuando esté sentado.
- No use el asiento si se encuentra en una pendiente o terreno irregular.
- La cesta tiene una capacidad de 5 Kg. Y los objetos no deben sobresalir de ella.
- Para frenar el andador temporalmente, presione hacia abajo las dos empuñaduras a la vez.

## 6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### Mantenimiento

La suciedad normal en las piezas de metal y plástico se puede eliminar con agentes de limpieza normales.

Compruebe el contenido de los agentes de limpieza y utilice únicamente productos adecuados para la limpieza y desinfección. No utilice disolventes o agentes de limpieza abrasivos a pesar de la estructura sólida y el uso de materiales resistentes y anticorrosivos, el andador está sujeto a desgaste, por lo tanto, se recomienda revisar el andador con regularidad (una vez al año como mínimo).

Dicho control debería comprender: Un control visual de todas las partes del marco: si han sido dobladas, dañadas, gastadas o corroídas y, en particular, un control de lo siguiente

- Estructura del andador.
- Barras de empuje, asas y correa.
- Mangos de freno y cables de freno.
- Horquillas y ruedas delanteras.
- Ruedas traseras frenadas.
- Asiento y dispositivo de bloqueo.
- Bolsa de compras.
- Compruebe si falta alguna pieza de montaje (por ejemplo, tuercas, tornillos, remaches...) y si funcionan y están bien apretados.
- Compruebe el funcionamiento de los frenos bajando la velocidad y frenando las ruedas.

### Limpieza

La limpieza y desinfección deben realizarse a intervalos regulares. Use una solución jabonosa suave sin abrasivos.

Se pueden utilizar métodos estándar para la desinfección. No utilice equipos de inyección de vapor ni limpiadores para fregar o corrosivos.

## 7. GARANTÍA

### DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

### LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

**NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.**

**CONTACTE CON SU PROVEEDOR.**

## ANDADOR MAGNUM

El andador con asiento Magnum, está fabricado en aluminio, material ligero que permite un uso continuado por parte del usuario.



## Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.



Producto sanitario conforme con el MDR.

## Manual de usuario

Andador de exterior Magnum

V4 · 25/01/2022